

BRUGSANVISNING

Instruktioner til medicinsk splint
5003000 Flexsplint

Flexsplint medicinsk splint/træksplint

Anvendelsesformål

Flexsplint er en fysisk støtte til skadede patienter til at sikre eller støtte patienter under førstehjælp eller fysioterapi. Medicinske skinner benyttes på patientens øvre eller nedre ekstremiteter for at understøtte, korrigere eller justere kropsstrukturer for en funktionel forbedring.

Tilsligtede brugere

Den medicinske skinne er beregnet til: Militærmedicin, præhospital brug, friluftsliv, skipatrujer, dyrlæger m.m.

Brugervejledning

Form den medicinske skinne til en passende form til at understøtte den skadede kropsdel.

Fiksér kropsdelen og den medicinske skinne med bandage eller tape.

- Let og kompakt
- Hurtig immobilisering af en skadet legemsdel
- Vandtæt
- Vandafvisende og røngtengennemtrængelig
- Latex fri

Rengøring og desinfektion

1. Rengør splinten med varmt sæbevand og en klud eller en blød børste, eller aftør med et mildt opløsningsmiddel efter hver brug, og tør ved stuetemperatur.
2. Tør alle overflader af med et desinfektionsmiddel. Følg lokale retningslinjer for rengøring. Skyld grundigt med stærkt rengøringsmiddel efterfølgende.

Opbevaring Undgå høj temperatur og fugt

Opbevaringstid Fem år



Advarsel

Brug under vejledning af læge eller sygeplejerske



Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd.
500 meter, Nan Sucun, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsen, 053600, Kina.



MedNet EC- REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

Distribution DENMARK:
Ferno Norden A/S
Company reg.nr.: DK 15280689
www.fernonorden.dk
Phone: +45 43 62 43 16
Address: Herstedvang 8,
2620 Albertslund – Denmark



Dato: 31 august 2020

Version: A / 1