


Instruktioner for brug


Instruktioner til at trække

1

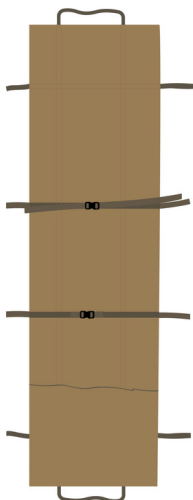


Åbn Retmex.

2

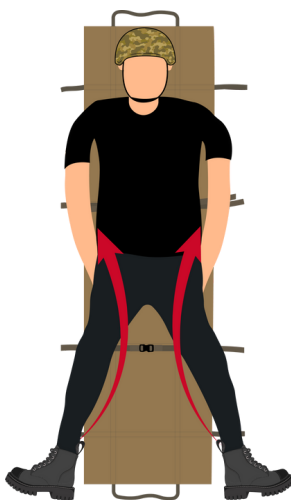


Træk fodsektionen op mellem patientens ben. Sørg for at den sidder som en "ble".

3

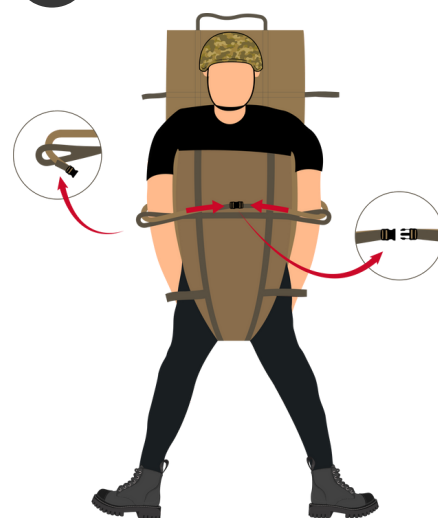

For at fikse patienten inde i Retmex, trækkes fikseringsremmene gennem håndtagene, og remmene lukkes.

4

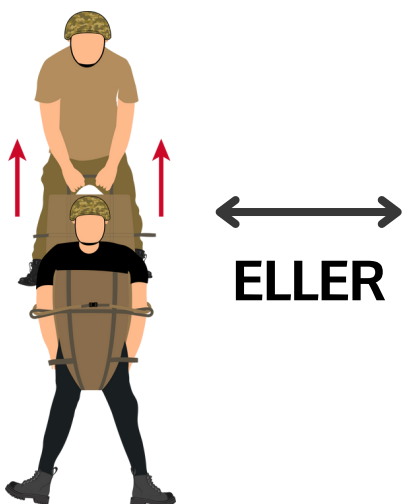

Brug nu håndtaget til at trække patienten i sikkerhed.

ELLER



Hvis I er 2 personer om at bruge Retmex kan håndtagene på de lange sider bruges til at trække.



TIP

Sørg for at armene er placeret under fikseringsremmene.



ADVARSEL

Friktion på grund af slæb, skarpe kanter eller fremspring kan skade Retmex, og dermed reducere produktets effektivitet.

Instruktioner til løft

- Placer patienten i midten af redningsunderlaget. Du kan, hvis det bliver nødvendigt, bruge log roll-teknikken til at placere Retmex under patienten.
- Hvis I er 2 personer om at bruge redningsunderlaget, skal en person stå ved patientens fodende og en person skal stå ved patientens hovedende. Sørg for at din ryg holdes i rette position for at undgå skader. Sørg for at løfte fra knæene.
- I en ideel situation bør redningsunderlaget bruges med 3-4 personer. Brug håndtagene på de lange sider af Rescue Sheet til at løfte patienten og flytte vedkommende til et sikkert område.



ADVARSEL

Vær forsigtig når du løfter. Sørg for at du forstår de korrekte teknikker for manuel håndtering. Løft af tunge objekter kan føre til alvorlige skader.

