



BRUGSANVISNING – Manuel sugpumpe (Manual Vacuum Pump)

Tilsigtet anvendelse (Intended Purpose)

Manuel sugpumpe er et hånddrevet medicinsk udstyr beregnet til at generere undertryk for midlertidig fjernelse af væsker og sekreter fra luftvejene i akutte og kliniske situationer.

Udstyret er ikke beregnet til kontinuerlig eller langvarig sugning.

Tilsigtede brugere

Sundhedspersonale samt uddannet ambulance-, rednings- eller førstehjælpspersonale.

Patientgruppe

Voksne og børn, i henhold til gældende kliniske retningslinjer.

Produktbeskrivelse

Manuel sugpumpe er en let, bærbar og hånddrevet sugenhed designet til enhåndsbetjening, så den anden hånd kan anvendes til andre opgaver.

Udstyret består af et genanvendeligt vakuumpumpehåndtag, en engangs opsamlingsbeholder på 300 ml samt sugkatetre til voksne og børn.

Sugstyrken kan justeres mellem 50 % og 100 % slaglængde.

Kontraindikationer

Anvend ikke udstyret, hvis nogen komponent mangler, er beskadiget eller kontamineret.

Anvend ikke udstyret, hvis pumpehåndtaget er revnet eller beskadiget.

Advarsler

- Udstyret må ikke anvendes op-ned.
- Autoklavér ingen komponenter
- Nedsenk ikke pumpen i væske
- Må kun anvendes af uddannet personale

Forholdsregler

Sørg for, at alle tilslutninger er sikre før brug.

Hvis modstanden øges, skal brugen stoppes, og der kontrolleres for blokering.

Brugsanvisning

1. Vælg passende sugkateterstørrelse
2. Tilslut kateteret til opsamlingsbeholderen
3. Fastgør beholderen sikkert til pumpehåndtaget
4. Vælg 50 % eller 100 % slaglængde
5. Betjen aftrækkeren for at skabe undertryk
6. Fjern kateteret langsomt efter brug

7. Bortskaf engangskomponenter i henhold til lokale retningslinjer

Ydeevne

Undertryk ved 20 kPa (1 min): ≥ 15 kPa

Maksimalt undertryk: $\geq 39,9$ kPa

Opsamlingsbeholderens volumen: 300 ml

Tekniske data

Driftstemperatur: -20 °C til $+50$ °C

Opbevaringstemperatur: -40 °C til $+60$ °C

Nettovægt: 230 g

Rengøring

Rengør genanvendelige dele med varmt vand og mildt rengøringsmiddel.

Må ikke autoklaveres.

Opbevaring

Opbevares tørt. Beskyttes mod beskadigelse. Overhold angivne temperaturgrænser.

Symboler

Symboler er i overensstemmelse med ISO 15223-1. Se mærkning for forklaring.

UDI

UDI er angivet på produktets mærkning og emballage.

Producent

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd.

No. 7th, Middle Xinzha Road,

Zhashang Industrial Zone, Yangshe Town,

Zhangjiagang City, Jiangsu 215600, Kina

EU-autoriseret repræsentant

SUNGO Europe B.V.

Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7

2909VA Capelle aan den IJssel, Nederlandene

Distributør

Heimdall Rescue

Innlaget 25, 3185 Skoppum, Norge

Overensstemmelse med lovgivning

Dette medicinske udstyr er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Dokumentkontrol

IFU-MS-001 | Rev. 01 | 2026-01-20