

Model 71 Basket serie produktlevetid

Ferno anbefaler en maksimal driftslevetid på ikke længere end ti (10) år fra fremstillingsdatoen for sin model 71 serie af redningsbåre. Levetiden vil afhænge af brugen af kurvebåren, hvor og hvordan den opbevares, om den har været udsat for ekstreme temperaturer, ild eller flamme mm.

Model 71 redningsbåren er fremstillet af HDPE med et ekstra UV-additiv, som gør kurvebåren meget robust og UV-stabil. Over tid vil UV-eksponering dog i sidste ende påvirke kurvebåren, hvis den opbevares udendørs i solen og udsættes for høje temperaturer. Det er vigtigt, at du følger vedligeholdelsesvejledningen (se nedenfor) og dokumenterer inspektioner i den anviste sektion i brugermanualen. Du skal følge anbefalingerne efter hver brug. Daglig brug i redningsaktioner, opbevaring i direkte sollys eller daglig kontakt med saltvand kan reducere bårens levetid hurtigt. Ved at følge vedligeholdelsesvejledningen i brugermanualen og beskytte produktet mod miljøfaktorer som direkte sollys med vores opbevaringspose eller andre løsninger vil forlænge produktets levetid.

Ferno tilbyder som standard 12 måneders garanti på alle nye båre, medmindre andet er angivet i produktets brugermanual. Service og reservedelssupport vil blive ydet på alle båre til den anbefalede maksimale levetid for produktet. Model 71 redningsbåren har et års garanti undtaget dele, der kan være en del af den begrænsede garanti, såsom de bløde varer som eksempelvis stof og reb. Læs brugermanualen, der er vedlagt hvert produkt, eller kontakt din lokale Ferno-forhandler for at få en opdateret version.

Der skal foretages regelmæssige eftersyn af en sagkyndig person, minimum en (1) gang om året. Eftersynet skal gennemføres efter nedenstående anvisninger eller på anden ligeså forsvarlig måde.

Anvisning til minimums kontrolpunkter:

- Er alle komponenter til stede?
- Er alle nitter sikkert fastgjort?
- Er kurvebåren fri for huller, revner, dybe hakker og snit?
- Undersøg for misfarvning af det orange HPDE- materiale der kan tyde på slid eller beskadigelse. Opbevar båren væk fra varme og direkte sollys.
- Er bårens ramme fri for bøjninger og revner?
- Er seleremmene i god stand uden snit eller flossede kanter.
- Er selespænder fri for synlige skader og fungerer de korrekt?
- Er puden fri for snit og huller?
- Sidder puden ordentligt fast på båren?
- Splitbar version (kun model 71-S): Er centerpladen, forbindelsesstifter og samlingsstifter samt husninger til stifterne til stede og i god stand, og kan bårens halvdele fastgøres og afmonteres korrekt?
- Model 71-M: Er løbeskiner i god stand og sikkert fastgjort til kurven? Er vinylbelægningen på rammen på plads, og er plastnitterne (kurv til ramme) sikkert på plads?