



KVIK GUIDE

Viper ambulancebåre

UDLADNING AF BÅRE

1. Tryk det røde håndtag på låsen ned (fig.1).
2. Træk båren ud, indtil den stopper.
3. Tryk på piletasten for at sænke hjulbasen til jorden (fig. 2).
4. Frigør båren fra bårelåsen med den røde udløserknap (fig. 3).

INDLADNING AF BÅRE

1. Sørg for, at båren er i fuld længde, hvis teleskopdelen er blevet manuelt forkortet.
2. Kør båren ind i låsen i den korrekte højde. (Korrekt højde er forprogrammeret).
3. Skub båren mod bårelåsen, indtil den låser. Mærk om den sidder fast.
4. Tryk på piletasten for at få hjulbasen op (fig. 5).
5. Skub båren ind, indtil der høres et klik, båren er nu låst.

JUSTÉR ALMINDELIGE FUNKTIONER PÅ BÅREN

- Justér fodenden med håndtaget på højre side af patientens ben.
- Chok position - Tryk på håndtaget og løft benene (fig. 6).
- Knæbøj - Løft først benene som i chok position, og vælg derefter en vinkel med håndtaget ved siden af (fig. 7).
- Justér ryglænet. Ryglænet er trinløst justerbart mellem 0° - 90° med betjening bag ryglænet (fig. 8).
- Forkort bårens længde. Tryk de røde håndtag mod dig, og komprimér bårerammen.
- **OBS: Rammen skal tilbage i udstrakt position og låses på plads, før båren indlades i køretøjet (fig. 9).**
- Fold sidestøtter ud. Sidestøtterne har fem låsepositioner og kan desuden foldes helt ned. Skub den røde op og juster støtten. Hvis den er belastet med vægt, skal du løfte støtten en lille smule (fig. 10).
- Hjulene låses med bremsepedalen (fig. 11).
- Retningsbestemte hjul. I ulåst position roterer alle fire hjul. I låst position låses retningen på forhjulene (fig. 12).



Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6



Figur 7



Figur 8



Figur 9



Figur 10



Figur 11



Figur 12

MANUEL IND- OG UDLADNING I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT

Til håndtering af båren ved strømsvigt anvendes det manuelle håndtag i fodenden (fig. 13+14).



Figur 13



Figur 14

UDLADNING AF BÅRE UDEN STRØM

1. Tryk det røde håndtag på låsen ned (fig.1). (Som ved normal procedure).
2. Træk båren ud, indtil den stopper. (Som ved normal procedure).
3. For at sænke hjulbasen skal du trække i de manuelle håndtag, indtil de når jorden.
4. Frigør båren fra bærelåsen med den røde udløserknap (fig. 3). (Som ved normal procedure).

INDLADNING AF BÅRE UDEN STRØM

1. Operatører står i hver deres ende af båren.
2. Løft båren lidt for at aflaste låsemekanismen.
3. Træk i det manuelle håndtag og hæv båren til den ønskede højde - hold i den position.
4. Slip det manuelle håndtag for at låse båren i den ønskede højde.
5. Rul båren ind som sædvanligt mod bærelåsen, indtil båren låser.
6. Træk det manuelle håndtag ud.
7. Skub hjulbasen op mod båren, så benene foldes op.

OBS! Der er fare for at klemme fingrene, hold fingrene langs rammen, så de hviler på ydersiderne.

8. Slip det manuelle håndtag og skub båren ind som normalt, indtil der høres et klik. Båren er nu låst.