



HLR bræt

Beskrivelse

Ferno HLR bræt giver en fast overflade til HLR træning og håndtering. Hovedkoppen opretholder korrekt justering af patientens hoved og hjælper med at placere patienten korrekt og sikre en konstant, åben luftvej. Formede sider gør det nemmere at løfte patienten.

Brug


HLR brættet skal skubbes ind under patienten og sikre, at patientens hoved er placeret i den afrundede hovedkop i brættet for at opretholde en korrekt linje for at udføre HLR.

Rengøring & Desinfektion

HLR brættet er lavet af rillet, højresistent polyethylen. For at rengøre skal du tørre med rengørings- og desinficeringsmiddel.

Specifikationer

Længde:	60 cm
Bredde:	42 cm
Dybde (tykkeste punkt):	6,35 cm

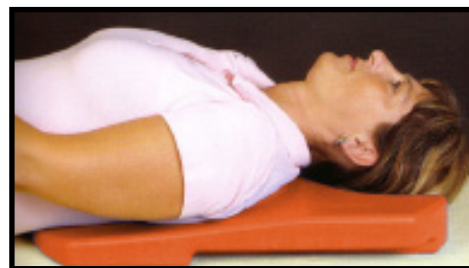

HLR bræt i brug

ANSVARSRASKRIVELSE

Denne manual indeholder generelle instruktioner for brug, betjening og pleje af dette produkt. Instruktionerne er ikke altomfattende. Sikker og korrekt brug af dette produkt er udelukkende baseret på brugerens skøn. Sikkerhedsoplysninger er inkluderet som en service til brugeren. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger, som tages af brugeren, bør være inden for og under hensyntagen til gældende regler og lokal protokol. Der skal gives træning i korrekt brug af dette produkt, før produktet bruges i en faktisk situation.

Gem denne manual til fremtidig reference. Inkluder det med produktet i tilfælde af overførsel til nye brugere. Yderligere kopier er tilgængelige efter anmodning hos kundeservice.

PROPRIETÆR MEDDELELSE

Oplysningerne i denne manual tilhører Ferno Canada, Mississauga, Ontario, Canada.

Ferno Canada forbeholder sig alle intellektuelle ejendomsrettigheder, ejendomsretlige designrettigheder, fremstillingsrettigheder, reproduktionsbrugsrettigheder og salgsbrugsrettigheder hertil og til enhver artikel, der er anført deri, undtagen i det omfang disse rettigheder udtrykkeligt er givet til andre, eller hvor det ikke gælder for leverandørens ejendomsretlige dele.

© Copyright Ferno Canada Alle rettigheder forbeholdes.



MEDICINSK Udstyr
GTN/UDI 00754016222078



Fremstillet i Kina for Ferno Canada
2460 Tedlo Street, Mississauga Ontario
L5A 3V3, Canada
+ 1-866-998-7866



FERNO S.r.l.
via B. Zallone, n. 26, 40066
Pieve di Cento, Bologna,
+39.051.6860028

1. Symbolordliste

De her definerede symboler bruges på HLR brættet og/eller i denne manual. Ferno bruger symboler, der er anerkendt af International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI) og industrien for akutmedicinske tjenester.



Referencenummer
(Produktnavn)



Batchnummer



Fremstillingsdato



Læs brugermanualen



Producent



Autoriseret repræsentant i Det
Europæiske Fællesskab



Produktet opfylder EU-standarder



Belastningskapacitet



Generel advarsel om potentiel personskade

VARSEL

Træning er påkrævet, før du bruger dette HLR bræt. Henvi til de angivne instrukser før brug. Undersøg HLR brættet for slitage før hver brug og tag det ud af drift, hvis der findes synlige tegn på skade.

2. Operatørfærdigheder og træning

2.1 Færdigheder

Operatører, der bruger HLR brættet har brug for:

1. Et praktisk kendskab til akutte patienthåndteringsprocedurer.
2. At følge lokale protokoller og retningslinjer som fastsat af din organisation.

2.2 Træning

Kursister skal:

1. Følge et træningsprogram designet eller godkendt af deres uddannelsesansvarlige.
2. Læs denne manual. For yderligere gratis brugermanualer, kontakt Ferno Canada's kundeservice.



ADVARSEL

Utrænede operatører kan forårsage skade eller komme til skade. Tillad kun uddannet personale at bruge HLR brættet.

KUNDESERVICE

Kunderelationer og produktsupport er vigtige aspekter af hvert Ferno Canada produkt. For hjælp med produktet kontakt venligst din lokale distributør eller Ferno Canada's kundeservice som anført nedenfor:

FERNO CANADA

2460 Tedlo Street, Mississauga, ON, L5A 3V3, Canada

Telefon (Canada)

1.800.543.3766

Website

www.ferno.ca

EUROPÆISK REPRÆSENTANT

Ferno Srl via B. Zallone, nr. 26, 40066 Pieve di Cento, Bologna, Italien

Telefon (Europa)

39.051.6860028