

# BRUKSANVISNING

## X-SPINDEL

**Svenska:** Bruksanvisning. X-Spindel



Denna bruksanvisning kan uppdateras utan att detta meddelas på förhand.  
Exemplar av den aktuella versionen finns att få från tillverkaren.

**Distributor:**

Ferno Norden AB

Phone: +46 (0) 520 420200

Fax: +46 (0) 520 420209

E-mail: [fab@fernonorden.com](mailto:fab@fernonorden.com)

[www.fernonorden.com](http://www.fernonorden.com)

**Manufacturer:**

AB Germa

Industrigatan 54-56

SE-291 36 Kristianstad

Sweden

Phone: +46 (0)44 12 30 30

Fax: +46 (0)44 10 31 79

E-mail: [info@germa.se](mailto:info@germa.se)

[www.germa.se](http://www.germa.se)

, 2010-05-31

# Svenska Bruksanvisning

## 1. Varningar och försiktighetsåtgärder



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Undvik att hantera X-Spindeln intill skarpa föremål och kanter.
- Kontrollera regelbundet att X-Spindeln är utan skador och att vidhäftningsförmågan är god.

## 2. Avsedd användning

**X-Spindel** är avsedd att användas som fixeringsrem vid immobilisering av patienter tillsammans med lämplig produkt, T.ex. Scoopbår, Backboard/ryggbräda samt huvudstöd. X-Spindel är endast avsedd att användas av personal med medicinsk bakgrund. Medicinskt ansvarig läkare anger alltid tänkt användningsområde med lokala anvisningar. Denna bruksanvisning anger enbart generella drag samt förslag på användning.

## 3. Specifikation

**Temperaturområde:** -30°C till +70°C

### Del/Material

Polypropen

## 4. Beskrivning

X-Spindeln är en sammansatt fixeringsrem med kardborrelåsning. Överst finns en X-funktion i rött som är tänkt att kryssas över axlar/thorax. Längsgående remmen följer patientens mittlinje. Fyra stycken tvärgående remmar används för fixering av bäcken och ben.

## 5. Användningsinstruktioner

1. Placera den skadade i den medicinskt önskvärda positionen på vald fixeringsprodukt.
2. Lägg X-Spindel över patienten, markeringen mitt i "X:et" placeras över bröstbenet.
3. Separera/dela inga kardborrelås före den aktuella remmen skall användas.
4. Börja med att fixera X:et över Thorax, OBS: VIKTIGT Fixeringen får ALDRIG spännas så hårt att den påverkar patientens andningsförmåga, Kontrollera detta upprepade gånger under handhavandet.
5. Fortsätt nedåt med de tvärgående remmarna 1-2 band över bäckenet, resterande över benen, minst 1 rem över låren och 1 rem på underbenen.
6. Mittremmen (röd) behövs inte spännas, då fixering erhålls av X-funktionen.
7. Var alltid OBSERVANT på risken med för hårt spända remmar, polstra med filt/handdukar lossa ev. vid behov.
8. Efter användning överväg tvättning samt vik omsorgsfullt kardborrelåsen mot varandra för att förhindra trassel.

## 6. Rengöring och desinficering

Rengör regelbundet X-Spindeln. Den kan tvättas med såpvatten och sköljas med rent vatten. Alternativt tvättas i maskin med nätpåse i 60 grader. Låt X-Spindeln torka ordentligt.

Om X-Spindeln behöver desinficeras tvätta noggrant enligt ovan och låt den torka. Rengör därefter med en lösning bestående av 70 % alkohol eller med desinficeringsmedel av typ LYSETOL AF.

## 7. Reparation av X-spindel

X-Spindeln är en produkt med begränsad livslängd. Kardborrelåsning tappar på sikt vidhäftningseffekt. Vid skador på X-Spindel bör den omedelbart kasseras.

## 8. Förvaring

X-Spindel levereras i en praktisk förvaringspåse. .

## 9. Beställningsinformation

GEAS405 X-Spindel

## 10. Tillbehör

GE14490100000 Förvaringspåse

## 11. BILDSPEL

