

S-240E, S-242E stol

40-E, 42-E stol

BRUGERMANUAL



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic

Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@ferno.sk

Fax: + 421 (0) 32 7708 011



Læs denne manual og
opbevar til fremtidig
reference

TIP: Regelmæssig rengøring hjælper
med at reducere risikoen for
overførsel af sygdom og gør det
muligt for udstyret at fungere
optimalt

Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner til brug, betjening og pleje af denne stol. Instruktionerne er ikke altomfattende. Sikker og korrekt brug af denne stol er udelukkende baseret på brugerens skøn. Sikkerhedsoplysninger er inkluderet som en service til brugeren. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger, der træffes af brugeren, skal være inden for og under overvejelse af gældende regler. Det anbefales, at der gives træning i korrekt brug af denne stol, før stolen bruges i en faktisk situation. Opbevar denne manual til fremtidig reference. Inkluder den med stolen i tilfælde af overførsel til nye brugere. Yderligere gratis kopier er tilgængelige efter anmodning fra FERNO Manufacturing.

Model S-242 E stol Produktspecifikationer

Dybde åben 74 cm
foldet 17 cm
Bredde 53 cm
Højde 92 cm
Enhedsvægt 11,6 kg
Bæreevne 159 kg



WARNING

Utrænede operatører kan forårsage personskade eller blive såret. Tillad kun uddannet personale at betjene stolen.

Forkert brug af stolen kan forårsage personskade. Brug kun stolen til det formål, der er beskrevet i denne manual.

Forkert betjening kan medføre personskade. Betjen kun stolen som beskrevet i denne manual.

En patient uden opsyn kan blive såret. Bliv hele tiden hos patienten.

En ikke fastspændt patient kan falde af stolen og komme til skade. Brug seleanordninger til at fastspænde patienten på stolen.

Hjælpere kan forårsage personskade. Oprethold kontrol over stolen, betjen betjeningsknapperne og diriger alle hjælpere.

Hjælpere kan blive såret. Vis hjælpere, hvor de skal gribe fat i stolen for at undgå klemmepunkter.

Forkert vedligeholdelse kan medføre personskade. Vedligehold kun stolen som beskrevet i denne manual.

Forkerte dele og service kan medføre personskade. Brug kun Ferno-dele og Ferno-godkendt service på stolen.

Ændring af stolen kan medføre personskade og skade. Brug kun stolen som designet af Ferno.

Fastgørelse af ukorrekte genstande på stolen kan forårsage personskade. Brug kun Ferno-godkendte genstande på stolen.



Produktnummer	Produktnavn	GTIN / UDI
60-0110-009	STOL S-240E ORANGE (PAKKET)	8588008129708
60-0110-010	STOL S-242E ORANGE (PAKKET)	8588008129715
60-0110-013	STOL 40-E (PAKKET)	8588008129722
60-0110-014	STOL 42-E (PAKKET)	8588008129739

S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stolinstruktioner

[Produktnavn] Medicinsk udstyr S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stol

[Anvendelsesformål]

Model S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stol er en akutenhed til patienthåndtering. Hver stol i serien er beregnet til professionel brug af mindst to uddannede operatører. Stolen kan bæres af operatørerne. I denne manual bruges det generiske udtryk "stol", når funktionen deles af alle modeller i serien. Det individuelle stolnavn bruges, når funktionerne er forskellige.

[Anvendelse]

Model S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stolen er den valgte akutstol til: Militær, atletiktrænere, reddere, EMS, vildmarksredning, skipatrujler, udendørsaktiviteter, sikkerhedsingeniører, dyrlæger og mere.

[Brugsanvisning]

Foldning og udfoldning af stolen



[Rengøring og desinfektion]

Tør alle overflader af med desinfektionsmiddel. Følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger for påføringsmetode og kontakttid. Ferno anbefaler, at du inspicerer stolen for skader, når du desinficerer den.

[Inspicering af stolen]

Bed servicepersonalet om at vedligeholde udstyret regelmæssigt.

Hvis inspektionen viser beskadigelse eller overdreven slitage, skal stolen tages ud af drift, indtil reparationen er udført.

[Dele og service]

Kontakt FERNO eller din Ferno-forhandler for at bestille Ferno-dele og for professionel reparation af stolen. Din distributør er den eneste agent autoriseret af Ferno til at administrere, servicere og reparere Ferno-produkter.

Ferno Slovakia kontakt:

Ferno Slovakia s.r.o.

Bošáca 893, 913 07 Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

[Opbevaring]

Undgå høj temperatur og fugt

[Overensstemmelseserklæring]

Model S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E stol nævnt i denne manual er designet, fremstillet og testet til at opfylde specifikationerne i EN 1789 og EN 1865 standarder.



Advarsel

Brug under vejledning fra lægen eller sygeplejersken



Ferno Washingtomb Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italien
+39.051.6860028

